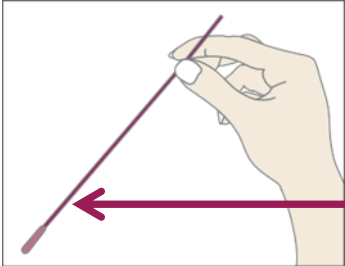


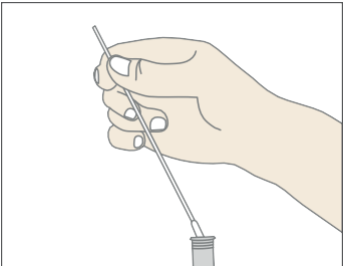
Anleitung zur Probenentnahme mit Trockentupfer bei Verdacht auf SARS-CoV-2

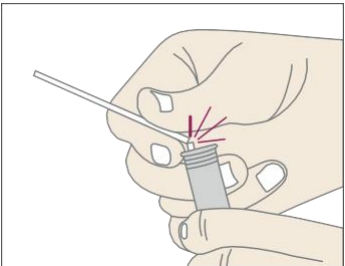
- 


1 Den Tupfer aus steriler Verpackung entnehmen.

Sollbruchstelle
- 

2 Probe im hinteren Rachenraum durch leichtes rotieren mit der Tupferspitze entnehmen.

CAVE:
Sollbruchstelle
- 

3 Röhrenkappe abschrauben und den Tupfer bis zu der Sollbruchstelle des Tupferstiels eingeben.
- 

4 Tupferstiel vorsichtig an der Sollbruchstelle abbrechen.
- 

5 Röhrenkappe wieder auf das Röhren setzen und fest zuschrauben.
- 

6 Röhren mit Barcodeetikett oder Patientendaten versehen.
- 

7 Röhren sofort an das Labor senden. Nach Möglichkeit die Probe bis zur Abholung gekühlt lagern.